



国際姿勢協会では“姿勢ドクター”という資格を発行し
姿勢に関連する幅広い知識を持った
指導者の養成に努めています。

姿勢ドクター

身体的機能低下を抱えているクライアントに対して身体的特徴、心理的な調整、食生活のバランスなどの要素から、生活機能の回復・向上を図るようカラダのバランスを整えコンディショニングを実践します。また、アスリートのパフォーマンス向上を目的にワン・オン・ワンで、コンディショニング(身体環境)を整え、スポーツ競技の特徴を活かした姿勢コンディショニング・エクササイズを取り入れた指導や痛みを伴わない手技を行います。

姿勢ドクターの指導では、クライアントに心理的な作用を最大限に高め、キネマティックチェーンを意識しながら活動する大切さを理解させ、身体を効果的に動かす能力を引き出すことで、身体的なトラブルから開放されることを目指します。アスリートにも、メンタルバランスと姿勢を整えるために、身体調整とコンディショニングエクササイズを実践していただき、身体能力を活性化させ、パフォーマンス向上を目指します。

フットチェッカーの活用により有効な
姿勢に関する専門知識や施術
インストラクションを習得できます！

詳しくは国際姿勢協会のウェブサイトをご覧ください
www.shiseiplus.com



アイテム 浮き指セルフケア



猫背・呼吸・自律神経を整え
⇒睡眠の質を高め、
記憶力をアップ



フットチェッカー |仕様

本体サイズ	595(w)×520(d)×55(h) mm	最大圧力	150kg ±10%
圧力範囲	758kpa	電圧	100~240V、50/60hz、DC12V 1.5A
センサー部サイズ	420 × 420mm	重量	5kg
センサー数	2,304 EA(48 × 48)	オペレーティングシステム	Windows® 10 Windows® 11

このパンフレットの内容は、2019年11月現在のものです。掲載している仕様・諸元の内容は、予告なく変更する場合があります。



株式会社ウエルアップ

〒220-0005
横浜市西区南幸 2-20-5 KDX 横浜リバーサイド 4F
TEL : 045-317-7908 / FAX : 045-317-7909
URL : <https://wellup.jp>

shisei®
国際姿勢協会
International Shisei Association®
www.shiseiplus.com

shisei®




足底圧センサー

Foot Checker

足底圧力の変化から
姿勢やカラダのバランスをチェック
測定・分析をより手軽に実現！

- 静止・歩行の測定を1台で可能に！
- 歩き方・立ち方・姿勢教室などのイベントにも大活躍！

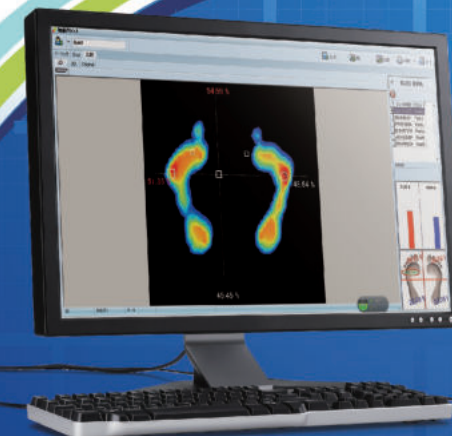

足裏から得られる情報を
わかりやすくビジュアル化！
足圧測定・分析を手軽に実現する

足底圧センサー

Foot Checker



フットチェッカーは
こんな場面で
活用されています




必要な情報を最適な方法
でデータ出力が可能です
ので、フィットネス、教育・医
療現場、学術論文の資料
作成、運動療法や指導など
さまざまな場面で役立て
ることができます。


shisei®

フットチェッカーの機能

2種類の足圧分析 スタティックモード & ダイナミックモード

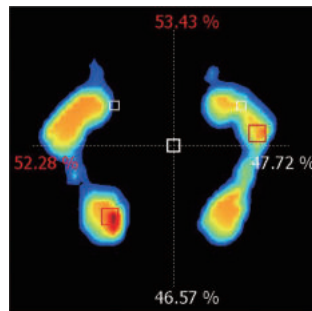


スタティック分析（立位での足圧分布計測）
静止時の足裏に掛かる圧力分布、
重心位置などを計測できます。

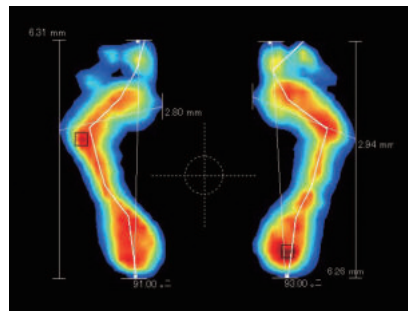


ダイナミック分析（歩行時の足圧分布計測）
歩行時の足裏に掛かる圧力分布、
重心移動などを計測できます。

デュアルモード分析

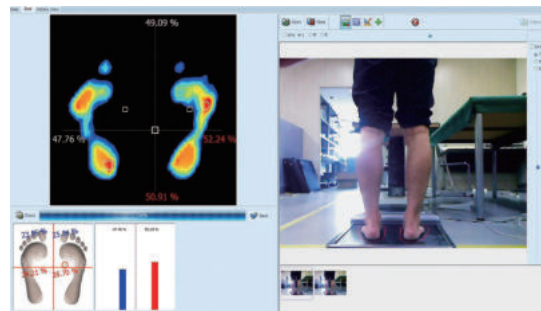


デュアルモード分析
スタティック分析とカメラ撮影による画像イメージを組み合わせた
分析と比較評価ができます。

動画再生

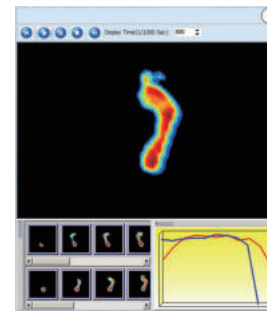


静止立位時の重心の移動軌跡や
歩行時の足圧分布を動画で記録し、
再生が可能です。

3D立体表示

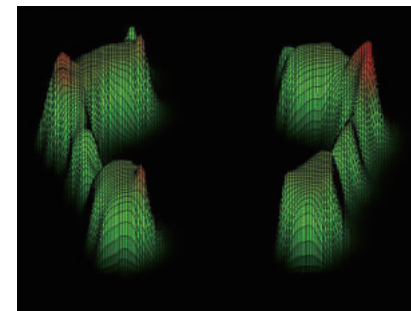


圧力分布を3D・立体で表現することができます。
圧力の度合いを立体的に見せることで
どのように圧力がかかっているのか
イメージしやすくなります。

ヘルプ機能

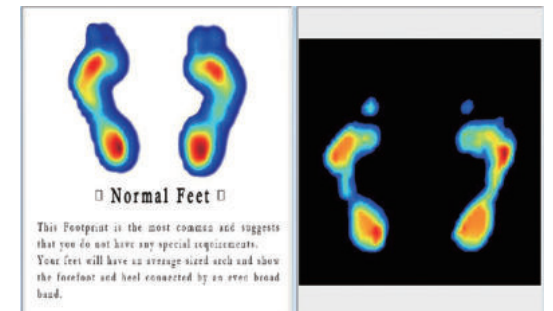


足圧分布のタイプ別に応じたヒントを表示します。


比較評価機能 測定履歴を管理・活用できます

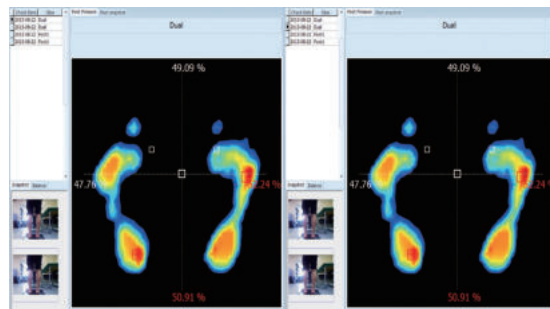

測定履歴表示機能を使用して過去のデータと比較評価ができます。
事前と事後の結果を見比べることによりわかりやすく測定者に説明を行えます。

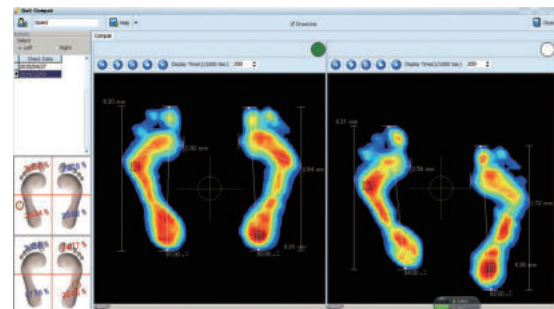


強力なレポート出力 さまざまな印刷設定オプションがあります

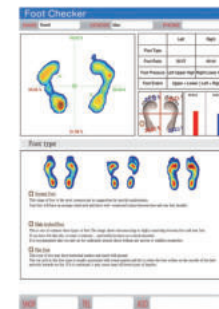


ベーシック足圧分布印刷



比較モード印刷

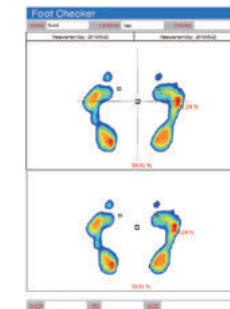

ズームアップ印刷

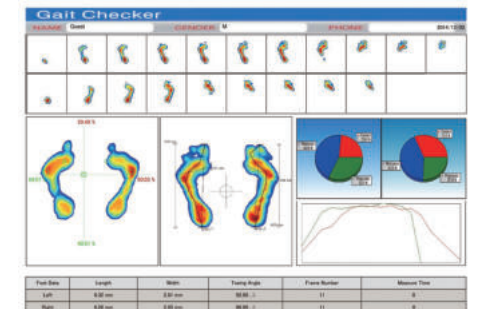

ダイナミックモード印刷

掲載している画面、帳票は英語ですが、実際の商品は日本語での表記が可能です。