

センサーマットを凌ぐセンサー **e伝之介くん®**

機能・強み・弱み	センサーマット	e伝之介くん
断線の恐れ	有り 利用者・介護者の不安/レンタル会社の手間・コスト増	無し
汚れ	有り 非衛生 / レンタル会社の手間・コスト増	無し
利用者以外の第三者への反応	誰が踏んでも反応する	利用者以外の第三者を認識しない
利用者が簡単に取り外す恐れ	有り	無し
起床	ベッドセンサー	1台で、ベッドセンサーとフットセンサーの役割
離床	フットセンサー	
寝返りでの反応	有り	無し

お部屋にも合わせられる、カラーバリエーション(色は未定)



株式会社ウエルアップ

〒220-0004

横浜市西区北幸 2-1-22 ナガオカビル 4F

TEL : 045-317-7908 / FAX : 045-317-7909

URL : <http://wellup.jp>

介護する人、
される人に、
笑顔をお届け。



センサーマットを凌ぐセンサー

e伝之介くん®

商標登録出願番号 2017-166373


カンタン取り付け、カンタン操作



株式会社エリントシステム

様々な介護の現場に対応します。

離れている場所でも、通信装置により音や光によるお知らせが可能ですので(距離～50m程度、周辺条件による)、ナースコールを導入していない小規模な介護施設を始め、グループホームや個人宅での介護にもお使いいただけます。病院等では、既存のナースコールシステムと接続してもご利用いただけます。

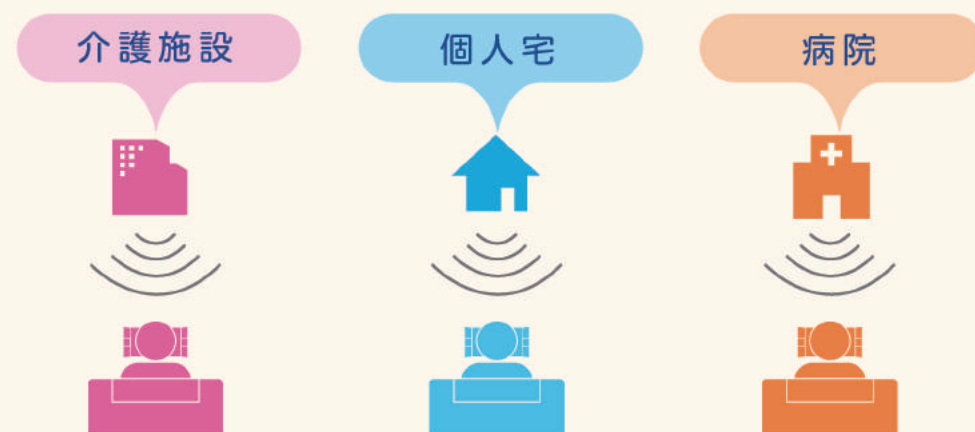

特徴

見守られていることを意識させないから、
介護される人の自由な行動を促し、自立を支援します。



◎ 起床も離床も、非接触センサーが一台で検出。

起床だけでなく離床も識別できる非接触センサーを搭載しているので、設置や操作の煩雑さから解放されるだけでなく、設備コストを抑えることもできます。

◎ ベッドを自動で検出。ベッドが動いてしまっても自動で位置調整。

◎ 認識率の高い高精度センサーだから安心。

お客様の安心のためには、誤報・未報を少なくすることが大切です。e伝之介くんは高度なセンシング技術により高い認識率を実現、シンプルな機能でコストも抑えています。

◎ 軽量で簡単取り付け。操作も解りやすく調整も不要。

◎ プライバシーに配慮した設計。

◎ 長寿命で衛生的な非接触型センサー。


◎ ベッドサイドの段差や煩わしいコードもなく、つまずきも防止。

専用スタンドで
設置場所を
選びません。



主な機能


- カメラから取り込んだ画像で、ベッド上の患者(介護者)の動きを監視。
「離床」「起床」をナースコール、または離れた場所でも音や光でお知らせします。
- 赤外カメラと赤外LEDを使用。暗闇でもしっかり監視できます。
赤外LEDは肉眼では見えないため、暗闇での監視感はありません。
- ベッドを自動で検出し、その後ベッドの位置が動いてしまっても自動で位置調整を行います。
- 電源をONするだけでセンシングが開始され、細かい調整は不要。

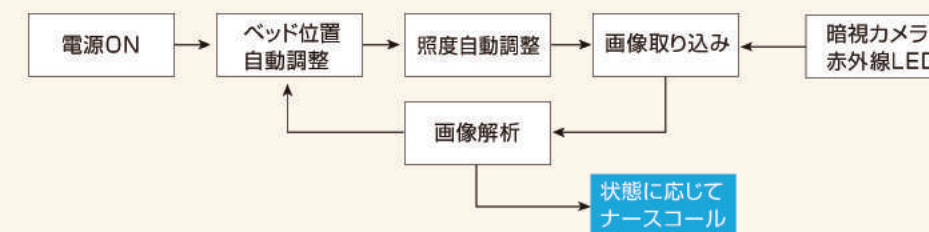

小規模施設にも嬉しいオプションをご用意。

Option

オリジナル
簡易ナースコール
システム

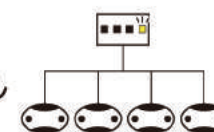


4室まで
音や光で
お知らせ



病院・施設
ナースコール

設置条件

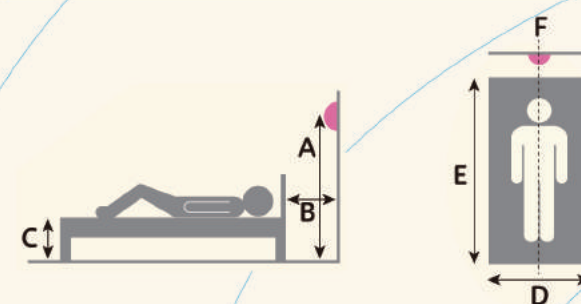

A: 床から見守りシステムまでの高さは170cm程度(ベッド面から140cm)

B: ベッドからカメラまでの距離: 0cm~20cm程度

C: ベッドの高さ: 33cm~50cm程度

D: ベッドの想定幅100cm前後

E: ベッドの想定長200cm前後

F: e伝之介くんをベッド幅方向のセンターの
頭側に設置してください。

